




DrugWipe® S – kratka navodila za uporabo

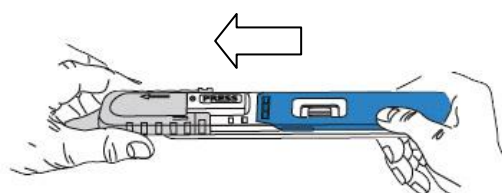


1. Potisnite kapico v smeri puščice, da se pokaže napis »PRESS»

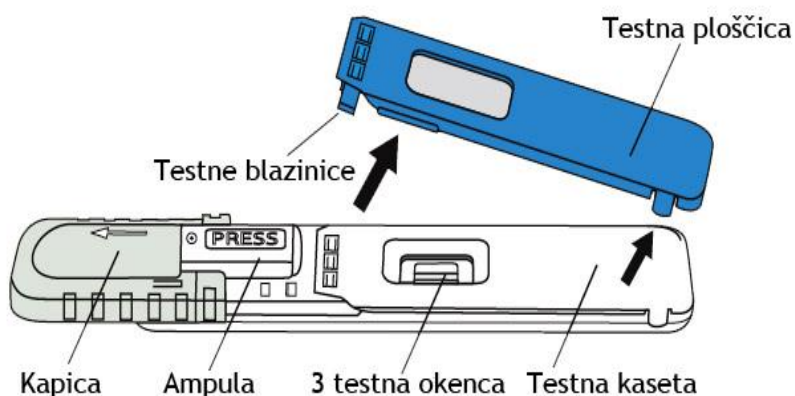


2. Ločite modro testno ploščico od bele testne kasete.
NE DOTIKAJTE SE TESTNIH BLAZINIC!

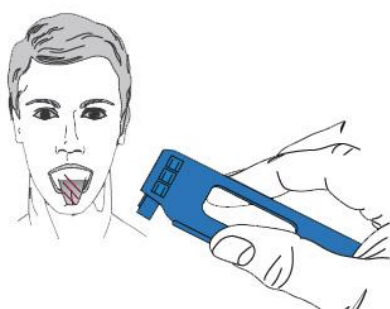


3. Oseba naj 3-krat zakroži z jezikom po notranjosti lic. S testnimi blazinicami testne ploščice naj nekajkrat potegne po jeziku, da blazinice spremenijo barvo iz rožnate v rumeno. To pomeni, da je zajeto dovolj slin za izvedbo testa.

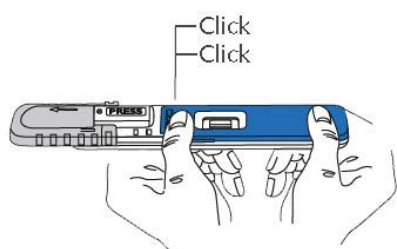

4. Postavite testno ploščico nazaj na testno kaseto. Pritisnite na obeh koncih, kot na sliki. Slišali boste dva klika.

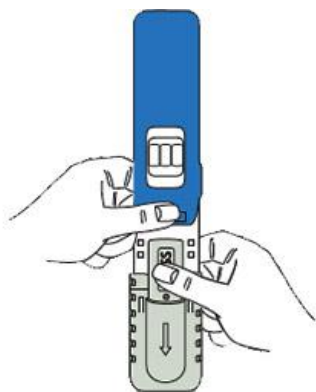

5. Testno kaseto postavite navpično, z ampulo spodaj. S palcem pritisnite na oznako "PRESS", da zdrobite ampulo. Držite testno kasetov v tem položaju še 10-15 sekund.
NE OBRAČAJTE KASETE NA GLAVO!

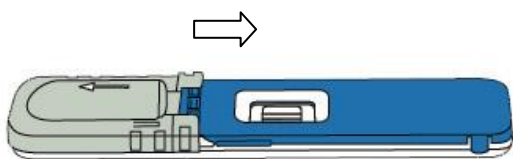

6. Potisnite kapico nazaj v izhodiščni položaj in postavite testno kaseto na vodoravno podlago. Začnite meriti čas in odčitajte rezultat po 8 minutah. Med čakanjem ne premikajte testne kasete.


Pomen kratic:

- CA Cannabis (THC/Marihuana/Hašiš)
BZO Benzodiazepini
AM/MET Amfetamini (Metamfetamini/Ecstasy)
CO Kokain/Crack
OP Opiati (Heroin/Morfij)
CL Kontrolna črta




Negativen rezultat = droge niso prisotne

Pokažejo se le kontrolne črte

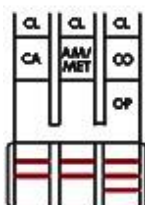


Pozitiven rezultat = uživanje drog

Pokažejo se vse kontrolne črte. Pojavijo se tudi ena ali več testnih črt, odvisno od tipa zaužite droge. Test je pozitiven, tudi če so črte blede ali nepopolne.

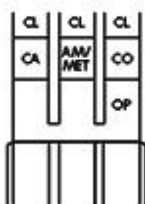

Neveljaven rezultat = ponovitev testa

Test je neveljaven, ko se ne pojavijo vse tri kontrolne črte. Ponovite test z novim DrugWipe 5 S testom.

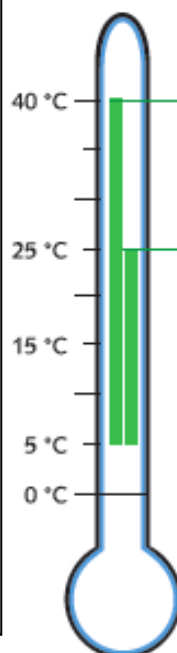

Izogibajte se temperaturam nad 40 °C!

5 - 40 °C: temperaturno področje uporabe

5 - 25 °C: temperaturno področje dolgotrajnega skladiščenja

Zamrzitev pokvari test in potencialno povzroči zdrobitev ampule.